


visio.lign

La pureté
des formes
conjugée
à la résistance



bredent

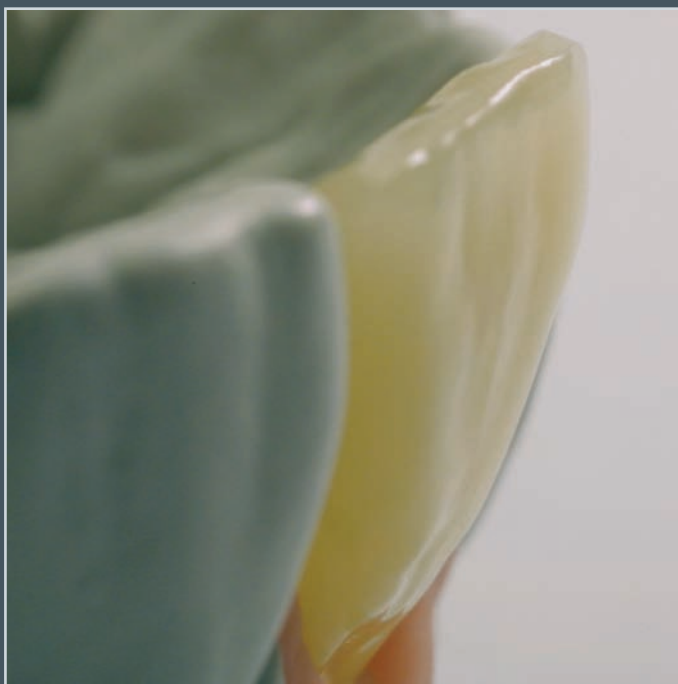

*Vitalité de la forme et naturel de l'état
de surface*

Description du produit

La gamme **visio.lign** s'enrichit d'un nouveau concept cosmétique. Celui-ci se compose de facettes multicouches, de dents artificielles pleines de vitalité et parfaitement anatomiques, de masses de caractérisation, de masses complémentaires et d'un système de liaison teinté.

La forme et les caractérisations sont soigneusement étudiées pour conférer à la dent la vitalité des dents naturelles. Les surfaces d'abrasion ont été conservées tout comme les asymétries et les structures de surface que l'on observe sur les dents naturelles.

Ces facettes et dents artificielles sont produites en série à partir d'un modèle numérisé et de techniques de fraisage ultramodernes afin de permettre une reproduction fidèle de l'état de surface filigrané et des plus subtiles caractérisations.

novo.lign A et **novo.lign P** sont uniques aussi bien au niveau de leur forme que de leur stratification et répondent aux exigences d'esthétique et d'efficacité du cabinet et du laboratoire.




*Prothèse adjointe sur couronnes
télescopes avec novo.lign A
Bridge vissé en Bio XS sur barre
primaire et implants SKY
Facette novo.lign A en tant que
restauration provisoire avec implant
whiteSKY*

Indications

- Couronnes télescopes et coniques
- Couronnes et bridges
- Travaux avec attachements
- Constructions implantaire
- Incrustations occlusales
- Essais cosmétiques
- Prothèse temporaire
- Prothèse complète

Prothèse implantaire

Les facettes cosmétiques **novo.lign A** et **novo.lign P** sont particulièrement indiquées pour la prothèse implantaire. Les essais cosmétiques sur les suprastructures sont facilités. Les fastidieux meulages des dents en résine sont supprimés. Avec **novo.lign A** et **novo.lign P**, seules quelques corrections seront nécessaires. Dès l'essai cosmétique, le patient pourra juger de l'aspect final de la prothèse. **novo.lign A** et **novo.lign P** assurent la réalisation d'incrustations de haute qualité que vous pourrez utiliser aussi bien pour les essais cosmétiques que pour la prothèse définitive.

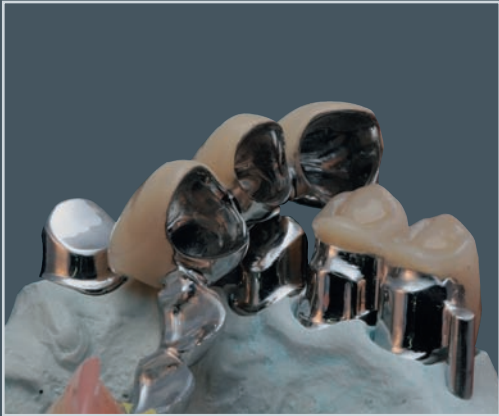

*Prothèse combinée avec novo.lign A sur couronnes télescopes avec attachement novo.lign A et novo.lign P sur infrastructure à barre vissée sur des implants
Facette novo.lign P pour le cosmétique de la partie occlusale*

Cosmétique occlusal


novo.lign P est destiné au cosmétique des faces occlusales/vestibulaires en secteur postérieur. Les facettes postérieures multicouches présentent une surface occlusale bien marquée et très translucide. La teinte saturée du noyau dentinaire rehausse naturellement les sillons centraux et garantit le bon rendu de la teinte de base ainsi que le recouvrement des structures primaires ou secondaires.

Dents complètes


Les dents antérieures et postérieures sont stratifiées différemment et enrichies de caractérisations personnalisées. En prothèse combinée, vous obtenez ainsi des nuances de teinte. Cette gamme de dents en plusieurs teintes et formes antérieures **neo.lign A** et postérieures **neo.lign P** constitue une évolution importante du concept **visio.lign**.

Concepts d'occlusion


Dans la pratique, différents concepts occlusaux et fonctionnels se sont imposés. **neo.lign P** et **novo.lign P** satisferont les utilisateurs souhaitant disposer d'un concept de surfaces occlusales multifonctionnelles. En partant d'une statique bien définie, ces facettes et ces dents sont utilisables avec toutes les méthodes actuelles de montage. Vous aurez une vue d'ensemble des systèmes et tendances dans ce domaine ainsi qu'un aperçu historique des évolutions en consultant l'ouvrage du cercle de travail en prothèse adjointe „Curriculum moderne Prothetik“.

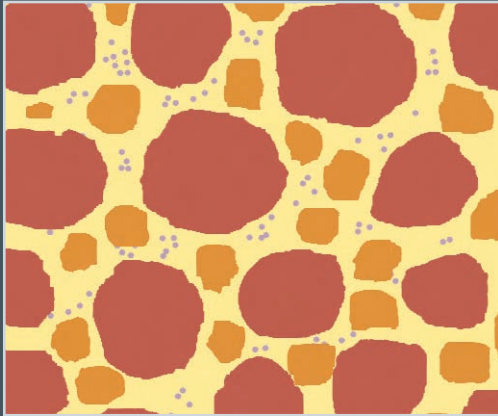

Charges anorganiques silanées
Résine à haut poids moléculaire
Copolymère à réticulation croisée
Matrice polymère à forte réticulation

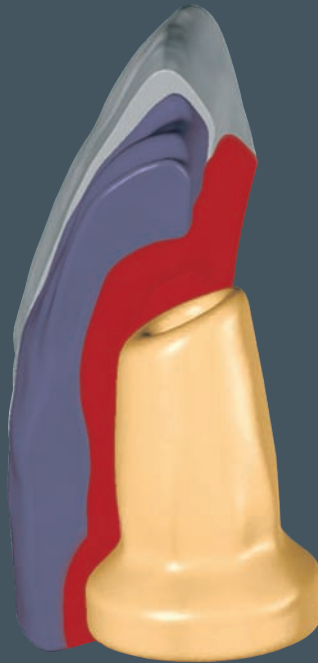

Email novo.lign A
Dentine: novo.lign A
Ciment: combu.lign
Structure
primaire/secondaire

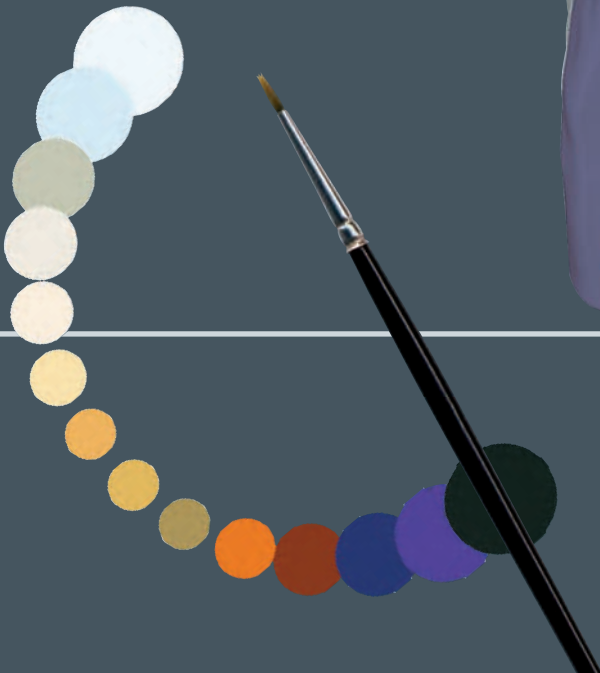

Polymère et charges novo.lign
Stratification et rendu chromatique
novo.lign
Coffret pour caractérisations chromatiques
crea.lign

Design & matériaux


Les facettes cosmétiques **novo.lign A** et **novo.lign P** présentent une épaisseur de 1 mm et sont conçues dans un polymère nouvellement développé contenant des charges de céramique. Les résines acrylates à réticulation croisée (PMMA) garantissent la stabilité chromatique et la résistance à la plaque. Les microcharges intégrées dans la matrice polymère renforcent la résistance à l'abrasion qui se rapproche beaucoup de celle des dents naturelles. La matrice composite bénéficie de la haute résistance en flexion des composites et de l'élasticité des résines PMMA.

Liaison & montage en couches

Le cosmétique est d'une grande qualité, chromatiquement stable et personnalisé grâce au ciment composite dont la teinte est assortie. La facette est d'abord conditionnée puis collée avec le composite que l'on peut sculpter. **combo.lign** est photopolymérisable et autopolymérisable à la fois, ce qui garantit une résistance cohésive durable.

Personnalisation

Les colorants en teintes saturées donnent toute la latitude requise pour les caractérisations telles que mamelons, zones de déminéralisation ou lobes dentinaires. Le nanocomposite **crea.lign** comportera parallèlement aux teintes dentinaires, intensives et transparentes également des teintes gingivales (esthétique rouge-blanc).

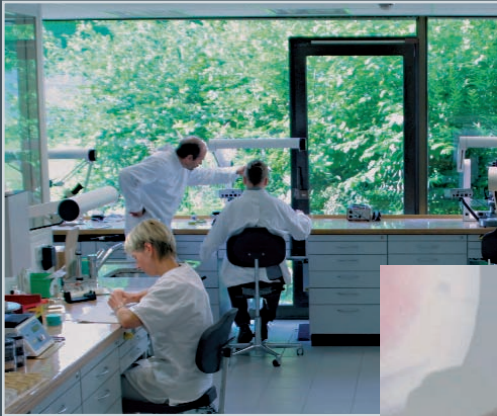

*Technique de mise en oeuvre
Formation sur les produits
Live-OP*

Assortiment Produits

novo.lign A, facettes de dent antérieure en 15 formes

novo.lign P, facettes de dent postérieure, 6 formes maxillaires et 6 formes mandibulaires

combo.lign, composite de scellement à polymérisation dual en teintes Vita Classical

neo.lign A et **neo.lign P**, 15 dents artificielles antérieures, 6 dents postérieures maxillaires et 6 dents postérieures mandibulaires

A partir de
03/09

crea.lign, composite de restauration microchargé, coffret pour caractérisations

Infos Fabricant

bredent, plus de 30 ans d'expérience dans la conception et la production de solutions et de produits innovants pour la dentisterie et la prothèse dentaire.

bredent

GmbH & Co.KG
Weissenhorner Str. 2
89250 Senden
Germany

Téléfono: +49 (0) 73 09 / 8 72-442

Telefax: +49 (0) 73 09 / 8 72-444

E-Mail: info-lab@bredent.com

Home: www.visio-lign.com

No. prospectus: 01/08 224 OF

Avec **visio.lign**, bredent contribue une fois encore à une plus grande synergie entre le cabinet dentaire et le laboratoire, notamment pour la prothèse implantaire. L'esthétique naturelle et personnalisée de **visio.lign** est une composante essentielle du „certified symbiotic system“, le concept systématisé de bredent pour la réalisation de prothèses précises, depuis la prise d'empreinte jusqu'à la pose en bouche.

Avec plus de 80 prothésistes et conseillers auprès des cabinets dentaires, plus de 100 distributeurs dans le monde, nous sommes toujours proches de vous.

L'esthétique naît de la forme
et de la lumière



visio.lign



bredent