

Mode d'emploi novo.lign A novo.lign P



Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit !

1. Domaine d'application

novo.lign A (Anterior) et novo.lign P (Posterior) sont des coquilles pour la technique d'incrustation. Elles remplacent la stratification personnalisée de la partie cosmétique avec des composites. Les problèmes de décoloration liés aux composites sont ainsi réduits car la structure de surface des coquilles est plus homogène et plus dense compte tenu de la fabrication industrielle.

Les coquilles s'utilisent pour le cosmétique des couronnes télescopiques et coniques, pour la prothèse amovible, les travaux avec attachements et implanto-portés, les essais esthétiques, la prothèse temporaire, la prothèse complète ainsi que pour les incrustations occlusales. Vu qu'il s'agit de préformes, les incrustations sont plus rapidement réalisées. Il est également possible de personnaliser les coquilles.

2. Mise en œuvre

Afin d'assurer la fonctionnalité et l'esthétique des dents à remplacer et à incruster, avant de sculpter l'infrastructure, monter les coquilles puis confectionner une clé. En se basant sur cette clé avec les coquilles, on peut poursuivre avec la sculpture de l'infrastructure. Il convient de prévoir un espace d'env. 0,3 mm sur l'infrastructure pour y fixer/coller les coquilles avec combo.lign (N° de cde **CO2x4...**). Il faut également prévoir des rétentions mécaniques. L'infrastructure sera ensuite coulée et dégrossie. Pour le collage avec combo.lign, l'infrastructure métallique et les coquilles novo.lign A et P doivent être sablées à l'oxyde d'aluminium 110 µ dans une sableuse sans recyclage de l'abrasif. Après ce sablage, conditionner l'infrastructure métallique avec Silano-Pen (N° de cde 320 0047 0).

Pour la mise en œuvre de combo.lign et viso.link, consulter le mode d'emploi correspondant.

3. Effets secondaires et risques

Lors du meulage des coquilles, des allergies sont dans certains cas possibles du fait de la poussière de PMMA dégagée. Si vous observez d'autres effets secondaires/risques, merci d'en informer bredent sans attendre.

4. Nettoyage des prothèses

Pour le nettoyage des prothèses, ne pas utiliser de produits réactifs. Nettoyer avec des dentifrices et des brossettes habituelles.

5. Divers

Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte. Les conseils d'utilisation donnés n'ont qu'une valeur indicative et reposent sur notre propre expérience. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation du produit. Aucune responsabilité du fabricant ne pourra être engagée en cas de résultats défectueux, bredent n'ayant aucune influence sur les étapes ultérieures de mise en œuvre. Toute indemnisation éventuelle se limitera à la valeur du produit.