

Istruzioni d'uso

novo.lign A

novo.lign P



Leggere attentamente le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.

1. Campo d'utilizzo

novo.lign A (frontali) e novo.lign P (posteriori) sono faccette in resina indicate per il rivestimento estetico. Queste faccette sostituiscono la stratificazione individuale del rivestimento in composito. In tal modo si riducono i problemi di decolorazione del composito, poiché la struttura superficiale delle faccette, grazie alla produzione industriale, risulta più omogenea e compatta.

Le faccette vengono utilizzate per il rivestimento estetico di corone coniche e telescopiche, di protesi rimovibili, di protesi combinate con attacchi, di protesi implantari, per prove estetiche, di provvisori, e per protesi totali, come anche per rivestimenti occlusali. Grazie alle faccette confezionate individualmente è possibile una rapida realizzazione dei rivestimenti estetici. È inoltre possibile individualizzare le faccette.

2. Lavorazione

Per ottenere un risultato estetico e funzionale dei denti da sostituire e rivestire, prima dell'inizio della modellazione della struttura, vengono montate le faccette ed infine viene realizzata una mascherina. Utilizzando quest'ultima con le faccette inserite è possibile realizzare la modellazione della struttura. Si deve fare attenzione che il successivo fissaggio o incollaggio delle faccette con il combo.lign (cod. nr. CO2x4...) necessita di uno spessore di ca. 0,3 mm tra la struttura metallica e la faccetta estetica. Inoltre dovrebbero essere applicate delle ritenzioni meccaniche. Successivamente la modellazione viene fusa e rifinita. Per l'incollaggio con il combo.lign, la struttura metallica e le faccette novo.lign A e P devono essere sabbiate con 110 µm di biossido di alluminio con una sabbiatrice monouso. Dopo la sabbatura condizionare il manufatto metallico con la Silano-Pen (cod. nr. 320 0047 0). Per ulteriori lavorazioni con il combo.lign ed il viso.link Vi preghiamo di attenervi alle corrispondenti istruzioni d'uso.

3. Effetti collaterali e rischi

Durante la rifinitura delle faccette, a causa della formazione di polveri PMMA, sono possibili reazioni allergiche. Nel caso dovessero insorgere altri effetti collaterali e rischi, Vi preghiamo di informare immediatamente la bredent.

4. Pulizia delle protesi

Per la pulizia delle protesi non utilizzare detergenti reattivi per protesi. Pulire con dentifrici in commercio e spazzolini per protesi.

5. Ulteriori indicazioni

I consigli e le avvertenze contenute in queste istruzioni d'uso sono aggiornati di continuo alle nuove conoscenze ed esperienze. Vi consigliamo quindi di leggere nuovamente le istruzioni d'uso del prodotto prima di utilizzare una nuova confezione. Questi consigli all'utente non sono vincolanti e si basano sulle esperienze aziendali. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. La bredent non si assume alcuna responsabilità per risultati non conformi, poiché non hanno alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.